

Sporty Cool Blue

Eine Binde - doppelter Effekt



Elastische kohäsive Stützbinde mit Kühleffekt zur Anwendung in der Erstversorgung auf intakter Haut (Medizinprodukt).

Ideal zur Ersten Hilfe bei Verletzungen des Haltungs- und Bewegungsapparates: Sporty Cool Blue hilft doppelt, denn sie bietet einen Kühlungs- und Kompressionseffekt.

Durch diese Kombination eignet sich die Binde zum kurzzeitigen Einsatz bei stumpfen Verletzungen bei zum Beispiel Zerrungen, Verstauchungen, Prellungen, Schwellungen oder Quetschungen.

Durch den gleichmäßigen Druck des Verbands können Schwellungen verhindert werden. Der Kühleffekt von mindestens einer Stunde führt zu einem reduzierten Schmerzempfinden.

Sporty Cool Blue stabilisiert das Gelenk und erhält dabei die Mobilität.

Sie zeichnet sich außerdem aus durch:

- Einfache Anwendung
- Gute Lagenhaftung
- Verband rutscht nicht

Anwendung

Binde an der betroffenen Stelle mit mäßigem Zug anlegen. Nach zwei bis drei Umwicklungen die Binde abschneiden. Die Lagen gut andrücken, der Verband haftet auf sich selbst.

Warnung

Nicht mit zu hohem Zug anlegen; nur für die äußere Anwendung; nicht mit offenen Wunden, Schleimhäuten und Augen in Kontakt bringen; entzündlich, Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, nicht während der Schwangerschaft oder dem Stillen anwenden, nicht bei Kindern unter 3 Jahren verwenden, zur Anwendung in der Erstversorgung.

Materialzusammensetzung: ca. 84% Polypropylen, 16% Elastan; Ethanol, Wasser, Kampfer, Menthol, Duftstoffe (enthält Terpeneol, Tetramethylacetyloctahydronaphthaline, Dimethylphenylacetat)



KOB GmbH
Lauterstraße 50
67752 Wolfstein,
Germany
www.kob.de

Unsere Öffnungszeiten

Mo, Di, Mi, Fr: 10.00–14.30 Uhr
Do: 10.00–17.00 Uhr
Sa, So, an Brückentagen: geschlossen

Für Gruppen öffnen wir auch nach
Anmeldung gerne zu Sonderöffnungszeiten!

Telefon: 06304 - 74 359