

Sporty Cool Blue

Eine Binde – doppelte Wirkung

KOB
Fabrikverkauf



Öffnungszeiten

Mo – Mi 10:00 – 14:30

Do 10:00 – 18.00

Fr 10:00 – 14:30

Wolfstein an der B 270

www.kob.de/fabrikverkauf

Tel +49.6304.74-359

Fax +49.6304.74-1359

Ob bei Sportverletzungen oder im ständigen Einsatz bei chronischen Beschwerden: Sporty Cool Blue hilft doppelt, denn Sporty Cool Blue bietet **Kühlung und Kompression**.

Diese einzigartige Kombination macht die Binde zur *ersten Wahl bei*:

- *Zerrungen, Verstauchungen, Prellungen, Schwellungen, Quetschungen*

Durch die **sofortige Kühlung** von bis zu 2 Stunden und die **Kompressionswirkung** breitet sich eine Schwellung weniger aus. Die Erstversorgung ist bis zur ärztlichen Behandlung gesichert.

Sporty Cool Blue **lindert sofort den Schmerz** und **erhält die Mobilität**.

Nur für die äußere Anwendung.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Kleinkindern ist die Anwendung erst ab Vollendung des 2. Lebensjahres zu empfehlen.

Nicht in Schwangerschaft und Stillzeit anwenden.

Entzündlich!

Nur zur Erstversorgung. Grundsätzlich die Binde nur auf intakter, unverletzter Haut anwenden.

Nicht auf offene Wunden, Schleimhäute und in Augennähe aufbringen.

Binde am Bein (Unter- / Oberschenkel) oder Arm in Spiraltouren mit 30-50 % Überlappung mit mäßigem Zug anlegen. Dabei die Binde unter keinen Umständen voll ausdehnen.

Die Lagen mit der Hand gut andrücken, damit der Verband von selbst haften kann. Es sind keine Klammern notwendig.

Nur zur Erstversorgung. Grundsätzlich die Binde nur auf intakter, unverletzter Haut anwenden.

Nicht auf offene Wunden, Schleimhäute und in Augennähe aufbringen.

Binde am Bein oder Arm in Spiraltouren mit 30-50 % Überlappung mit mäßigem Zug anlegen. Dabei die Binde unter keinen Umständen voll ausdehnen. Die Lagen mit der Hand gut andrücken, damit der Verband von selbst haften kann.

Es sind keine Klammern notwendig.

Preis 2.49 €