

DE: Gebrauchsanweisung Pedilay® leg

Produktbeschreibung

Pedilay® leg ist eine ein adaptierbarer gebrauchsfertiger Verband für das Bein, der den Unterschenkel bedeckt.

Das Produkt ist für die Anwendung auf intakter Haut vorgesehen. Die innere Lage besteht aus einem Vlies, das geringe Reibung (Scherkräfte) auf der Haut verursacht. Pedilay® leg kann die medizinische Behandlung pathologisch geformter Unterschenkel unterstützen (z. B. Ulcus Cruris). Dies wird durch ein zweilagiges Vlies mit eingearbeiteten elastischen Fäden ermöglicht. Das Klettverschlussystem lässt sich neu positionieren. Pedilay® leg kann am rechten oder linken Unterschenkel verwendet werden.

Medizinische Indikation(en)

Adaptierbarer, gebrauchsfertiger Verband für den Unterschenkel. Das Produkt unterstützt auch die medizinische Behandlung pathologisch geformter Unterschenkel (z. B. Ulcus Cruris). Zur Verwendung als Fixierbinde für den universellen Einsatz (auch für Wundauflagen). Je nach Größe ist eine Fixierung von Verbänden am Unterschenkel möglich. Verwendung als Schutzbinde über Wundauflagen oder Pflastern.

Anlegemethode (Empfehlung) oder entsprechend ärztlicher Anweisung

ANWENDUNGSSCHRITTE


- 1.) Den Verband am unteren Ende vorsichtig vordehnen. Die Nähte festhalten, um ein Einreißen zu verhindern. Die Öffnung mit den Klettverschlüssen nach vorne ausrichten.



- 2.) Das untere Ende vorsichtig über den Fuß bis zum Knöchel ziehen: Die Laschen der Öffnung nahe am Ende der Naht festhalten: Falls erforderlich, kann das Ende von innen mit der Hand aufgespreizt werden, um die Reibung am Fuß zu verringern.



- 3.) Die Verschlüsse nacheinander von unten nach oben vorfixieren. Darauf achten, dass sich die beiden Seiten der Öffnung ausreichend überlappen. Dann die Verschlüsse nachjustieren.

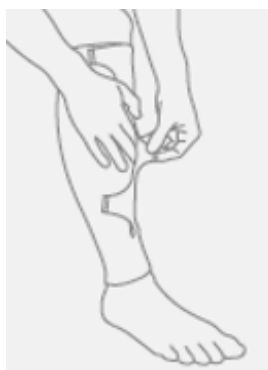

- 4.) Auf einen korrekten Sitz achten. Der Verband sollte vom Knöchel bis unterhalb des Knies führen und die Wundauflage vollständig bedecken.



- 5.) Der Verband sollte glatt und ohne Falten anliegen. Pedilay® leg darf nicht zu straff anliegen oder in die Haut einschneiden, und es muss ausreichende Restelastizität vorhanden sein.



- 6.) Zur Kontrolle der Wundauflage kann der Verband leicht geöffnet/geschlossen werden. Regelmäßig kontrollieren, ob der Verband noch sauber ist. Bei Bedarf können die Verschlüsse angezogen oder gelockert werden.



Die Verschlüsse in folgenden Fällen nachjustieren:

- bei einem Gefühl der Einschnürung
- wenn die Binde an einer Stelle nicht mehr elastisch ist oder sehr stramm sitzt
- bei Verrutschen des Verbandes
- bei Faltenbildung des Verbandes

Weitere Hinweise


Es wird empfohlen, Pedilay® leg im Sitzen oder Liegen anzulegen. Wählen Sie die passende Größe von Pedilay® leg gemäß der Größentabelle.

Erhältliche Größe

Bei der Größenauswahl ist Folgendes zu beachten:

- Die Dicke des Wundverbands
- Der Umfang des Unterschenkels kann sich im Laufe des Tages durch Bildung und Verringerung von Ödemen ändern
- Während des Heilungsprozesses oder nach einer Änderung der Behandlung muss die Produktgröße möglicherweise verändert werden
- Im Einzelfall können andere Faktoren eine andere Größe erforderlich machen

| Länge vom Knöchel bis Kniekehle ℓB-D | Wadenumfang cC | |
|---|----------------|----------|
| | Kurz | Lang |
| 32–41 cm | M | L |
| Lang | 28–42 cm | 39–53 cm |
| 39–48 cm | | |

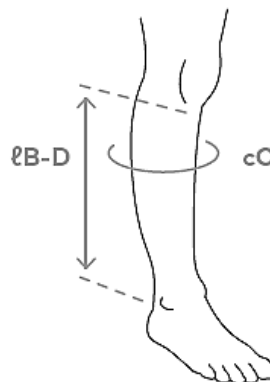

Pedilay® leg ist richtig angelegt, wenn sich keine Hohlräume bilden, keine Lücken oder Falten vorhanden sind und das Material keinen Druck/keine Kompression ausübt.

Verwenden Sie Pedilay® leg nur wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Material- und Personenschäden führen.

Achten Sie bei der Verwendung von Pedilay® leg darauf, dass die Binde nicht zu stramm angelegt wird und ausreichende Elastizität am Unterschenkel aufweist.

Bei Unsicherheiten bezüglich der Anwendung oder bei Verschlechterung des Gesundheitszustandes ist die Anwendung sofort abzubrechen und ärztlicher Rat einzuholen.

Bitte beachten Sie: **Wenn Sie bei der Verwendung dieses Produktes Grund zu der Annahme haben, dass ein schwerer Vorfall aufgetreten ist, melden Sie dies bitte dem Hersteller und Ihrer nationalen Behörde.**

Hygiene und Entsorgung

Pedilay® leg ist wie folgt zu wechseln:

- täglich bei akuten, infektiösen Wunden
- bei Verschmutzung
- wenn das Material überdehnt oder gerissen ist
- bei jedem Wechsel der darunter befindlichen Primärschicht (Wundauflage)

Die Wiederverwendung eines Medizinproduktes zum Einmalgebrauch ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um diese wiederzuverwenden, kann deren Beschaffenheit und Leistung ernsthaft beeinträchtigen.

Pedilay® leg kann mit dem normalen Hausabfall entsorgt werden.



Vertrieb durch:

Angaben des Händlers + Kontaktdaten + Website (falls zutreffend)

 **KOB GmbH**
Lauterstraße 50, 67752 Wolfstein, Germany
www.kob.de

Revisionsdatum: xxxx