

DE: Gebrauchsanweisung: Pedilay® foot**Produktbeschreibung**

Pedilay® foot ist ein adaptierbarer gebrauchsfertiger Verband für den Fuß, der diesen bis zum Knöchel bedeckt.


Das Produkt ist für die Anwendung auf intakter Haut vorgesehen. Die innere Lage besteht aus einem Vlies, das geringe Reibung (Scherkräfte) auf der Haut verursacht. Pedilay® foot kann die medizinische Behandlung abnorm geformter Füße unterstützen (z. B. diabetische Füße). Dies wird durch ein zweilagiges Vlies mit eingearbeiteten elastischen Fäden ermöglicht. Das Klettverschlussystem lässt sich neu positionieren. Pedilay® foot kann am rechten oder linken Fuß verwendet werden.

Medizinische Indikation(en)

Adaptierbarer, gebrauchsfertiger Fußverband: Das Produkt unterstützt auch die medizinische Behandlung abnorm geformter Füße (z. B. diabetischer Fuß). Zur Verwendung als Fixierbinde für den universellen Einsatz (auch für Wundauflagen). Je nach Größe ist eine Fixierung von Verbänden am Fuß möglich. Verwendung als Schutzbinde über Wundauflagen oder Pflastern.

Anlegemethode (Empfehlung) oder entsprechend ärztlicher Anweisung**ANWENDUNGSSCHRITTE**

- 1.) Die Verschlüsse öffnen und Pedilay® foot über die Zehen ziehen.
- 2.) Pedilay® foot nach hinten über den Fuß ziehen.
- 3.) Pedilay® foot auf die Länge des Fußes dehnen und über die Ferse hochziehen.
- 4.) Alle Verschlüsse nach den Anweisungen schließen.

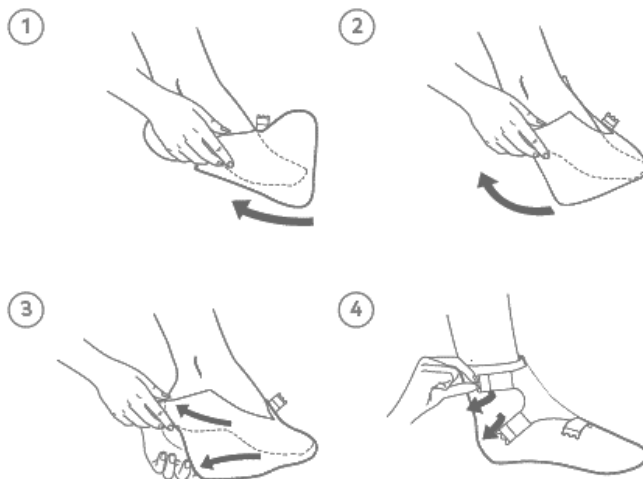

Weitere Hinweise

Es wird empfohlen, Pedilay® foot im Sitzen oder Liegen anzulegen.

Wählen Sie die passende Größe von Pedilay® foot gemäß der Größentabelle.

| | M | L | XL |
|------------------|---------|---------|---------|
| Schuhgrößen (EU) | 37 – 42 | 41 – 46 | 45 – 49 |
| Fußlänge in cm: | 20 – 26 | 25 – 32 | 28 – 35 |

Bei folgenden Faktoren muss evtl. eine andere Größe von Pedilay® foot gewählt werden:

- Fehlbildungen des Skeletts
- sehr voluminöse Füße
- geschwollene Füße
- Amputationen
- weitere Lagen von primären/sekundären Lagen (Wundauflagen)

Pedilay® foot ist richtig angelegt, wenn sich keine Hohlräume bilden, keine Lücken oder Falten vorhanden sind und das Material keinen Druck/keine Kompression ausübt.

Verwenden Sie Pedilay® foot nur wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Material- und Personenschäden führen.

Achten Sie bei der Verwendung von Pedilay® foot darauf, dass der Verband nicht zu stramm angelegt wird, den Fuß nicht dehnt und ausreichende Elastizität am Fuß aufweist.

Bei Unsicherheiten bezüglich der Anwendung oder bei Verschlechterung des Gesundheitszustandes ist die Anwendung sofort abzubrechen und ärztlicher Rat einzuholen. Es wird empfohlen, beim Gehen mit Pedilay® foot geeignetes Schuhwerk zu tragen (z. B. Schuhe, OP-Schuhe).

Bitte beachten Sie: **Wenn Sie bei der Verwendung dieses Produktes Grund zu der Annahme haben, dass ein schwerer Vorfall aufgetreten ist, melden Sie dies bitte dem Hersteller und Ihrer nationalen Behörde.**

Hygiene und Entsorgung

Pedilay® foot ist wie folgt zu wechseln:

- täglich bei akuten, infektiösen Wunden
- bei Verschmutzung
- wenn das Material überdehnt oder gerissen ist
- bei jedem Wechsel der darunter befindlichen Primärschicht (Wundauflage)


Die Wiederverwendung eines Medizinproduktes zum Einmalgebrauch ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um diese wiederzuverwenden, kann deren Beschaffenheit und Leistung ernsthaft beeinträchtigen.

Pedilay® foot kann mit dem normalen Hausabfall entsorgt werden.



Vertrieb durch:

Angaben des Händlers + Kontaktdaten + Website (falls zutreffend)

 KOB GmbH
Lauterstraße 50, 67752 Wolfstein, Germany
www.kob.de

Revisionsdatum: xxxx